

Erleben Sie den  
einzigartigen  
Effekt!



- **Nie wieder störende Speisereste unter Ihrer Prothese!**
- **Erhöhter Tragekomfort!**
- **Optimaler Schutz vor Druckstellen!**
- **Klinisch getestet!**
- **Problemlos täglich zu reinigen!**
- **Absolut geschmacksneutral!**
- **Packungsinhalt reicht bis zu 2 Monate!**
- **7 Tage fester Halt!**
- **Diskret und Unsichtbar!**

Seit über 15 Jahren  
erfolgreiche Anwendung  
in der Zahnmedizin.

**ARANDO**

Telefon +49 421 8984628  
Telefax +49 421 8984627  
E-Mail [office@arando-online.de](mailto:office@arando-online.de)  
[www.arando-online.de](http://www.arando-online.de)

Exklusiv Vertrieb:

# DinaBase<sup>7</sup>

Fester Halt wie nie zuvor!  
7 Tage absolute Sicherheit!



**Jetzt Neu!  
Nur in Ihrer  
Apotheke!**

# Wieder Sicherheit beim Sprechen, Essen und Lachen!

**DinaBase7** ist das einzige Haftgel mit „Saugnapfeffekt“.

Dieser garantiert ein hohes Maß an Stabilität und Tragekomfort, ganz ohne Haftcremes. Diesen „Saugnapfeffekt“ erreicht man dadurch, dass zwei befeuchtete Flächen aufeinander gepresst werden und eine von ihnen ein wenig elastisch ist.

Die mit **DinaBase7** beschichtete Zahnprothese passt sich so beim Beißen perfekt dem Kiefer an, die Luft entweicht und die Prothese saugt sich fest.



**DinaBase7** härtet langsam aus. Um optimalen Halt, Komfort und Hygiene zu bewahren, muss **DinaBase7** nach ca. 7 Tagen ausgetauscht werden. Hierzu die Prothese einfach 5-10 Minuten in heißes Wasser legen. Die alte Schicht lässt sich nun problemlos ablösen und eine neue Unterfütterung mit **DinaBase7** kann vorgenommen werden.

## So einfach geht's!

1



Die Tube in heißem Wasser erwärmen, um **DinaBase7** geschmeidiger zu machen.

2



Eine kirschgroße Portion **DinaBase7** auf die Mitte der Prothese geben.

3



**DinaBase7** von der Mitte nach außen gleichmäßig bis zum Rand verteilen.



## Fertig!



**DinaBase7** ist auch perfekt für die unteren Prothesen geeignet.



Durch die feste Haftung von **DinaBase7** ist das Reinigen mühelos.