

# GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Anpassung muss an den ZÄHNEN DES OBERKIEFERS durchgeführt werden.  
Für eine korrekte Anpassung beachten Sie bitte folgende Hinweise.

1\_ Die Anpassungsvorrichtung (VDC System) mit der Rundung nach unten halten. Sie wird in die Bite-Schiene Dr. Brux® eingesetzt, indem man bei einem der zwei Seitenlöcher anfängt. Nachdem man den ersten Dorn in eins der zwei Seitenlöcher eingesetzt hat, die Rundung weiten, um die drei Dorne in die drei Frontlöcher einzusetzen. Schließlich den letzten Seitendorn einsetzen (siehe bild A).

2\_ Vor der Anpassung die Schiene kurz in den Mund nehmen, um sich vor den nächsten Schritten an dasGerät zu gewöhnen.

3\_ Die Anpassungsvorrichtung wie abgebildet halten und die Schiene 6 Sekunden in kochendheißes Wasser (100°) tauchen (Zeit mit einem Chronometer messen) (abbild. B).

4 Aus dem Wasser nehmen und gut ausschütteln, um das restliche heiße Wasser zu entfernen. Die Schiene ist zwar warm, aber nicht zu heiß, so dass keine Verbrühungsgefahr besteht.

5\_ Zur Erleichterung des Einsetzvorgangs die Seiten der Bite-Schiene leicht auseinanderziehen (abbild. C).Vorsicht: Achten sie darauf, die Seiten nicht nach innen zu biegen und somit dem Biss auszusetzen (abbild. D).

6\_ Die Schiene in den Mund einsetzen und die Zähne zusammenbeißen, ohne zu stark zu pressen (abbild. E). Die Schiene mit geschlossenen Lippen wenigstens eine Minute ansaugen, um die enthaltene Luft zu entfernen und ein Vakuum zu erzeugen. Die Seiten der Schienen passen sich perfekt an den Zahninnen- und Außenflächen an. Dies garantiert einen optimalen Sitz der Schiene.

7\_ Die Schiene nach ungefähr einer Minute aus dem Mund nehmen und sie für mindestens zwei Minuten in kaltes Wasser tauchen. Anschließend die Anpassungsvorrichtung entfernen. Sie können jetzt Ihre.

# TIPPS

- Wenn Dr. Brux® nicht genau passt, wiederholen Sie den Anpassungsvorgang ab Punkt 3 nochmals, diesmal sorgfältiger.
- Die Anpassungsvorrichtung nicht wegwerfen, da die Schiene erneut angepasst werden kann, wenn sich Ihr Gebiss verändert.
- Störendes Material oder Falten können leicht mit einer kleinen Schere entfernt werden.
- Wenn Dr. Brux® zu lang ist, kann sie mit einer Schere gekürzt werden.
- Die Schiene nie mit heißem Wasser reinigen.
- Die Schiene nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren.
- Die Schiene nicht tragen, wenn die Anpassungsvorrichtung noch eingesetzt ist.

# HINWEIS

Die Schiene ist nicht für Milchzähne geeignet. Bei Funktionsstörungen des Zahn- oder Zahnhalteapparates, beim Tragen einer festen oder beweglichen Zahnsperre oder einer herausnehmbaren Prothese, fragen Sie Ihren Zahnarzt, bevor Sie Dr. Brux® benutzen.

# PFLEGE UND DESINFEKTION

Nach dem Gebrauch die Schiene, bevor sie in den Behälter gelegt wird, mit einer herkömmlichen Zahnbürste unter kaltem Wasser reinigen. Es wird empfohlen, einmal wöchentlich eine gründliche Desinfektion durchzuführen, um die Bildung von Bakterien durch Zahnbelag zu vermeiden. Für diese wöchentliche Reinigung wird empfohlen, das Konzentrat BiteSept® (bakterizid, viruzid und fungizid) zu verwenden. Dieses Produkt eignet sich auch für die Reinigung von Spangen, Mundschutz, Mundstücken und herausnehmbaren Zahnprothesen.



A



B



C



D